



フォラケア・スリム測定手順

1 挿入

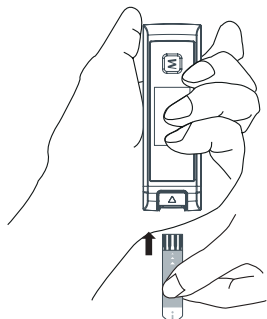


電源オフの状態
でセンサーを挿
入すると、自動
的に電源が入り
ます。

2 点着

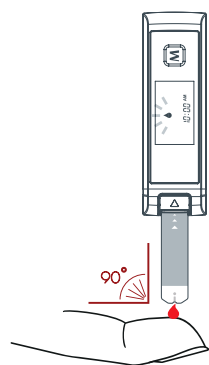

血液吸引口から
血液を吸引させ
ます。

黄色い部分がす
べて赤くなるま
で血液を吸引さ
せてください。

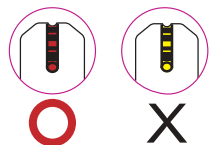


3 結果確認



測定終了後、結果を確認します。

4 廃棄

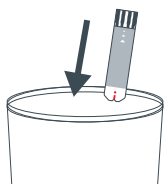

使用済みのセン
サーを抜いて適
切に廃棄します。

エラーメッセージ一覧

表示	原因	対処方法
Lo	結果が 20mg/dL 未満です。あるいは操作の誤りです。	新しいセンサーで再度測定を行ってください。
Hi	結果が 600mg/dL を超えています。あるいは操作の誤りです。	それでも同じ結果となる場合は主治医に相談してください。
E-b ▲	電池の残量が不十分です。	すぐに電池を取り換えてください。
E-U ▲	使用済みのセンサーが挿入されている可能性があります。	新しいセンサーで再度測定を行ってください。
E-F ▲	結果が表示される前にセンサーがはずれた可能性があります。	
E-t ▲ Lo	本品で検知した温度が許容範囲外です。	10 ~ 40℃ の環境にしばらく置いてから測定してください。
E-t ▲ Hi		

ナーすうさちゃんより

- ◎しっかり手洗いしてから測定すること
- ◎機械が汚れたらきれいに拭くこと
- ◎測定結果は忘れずに記録すること
- ◎電池交換は DC 3V CR2032 リチウム電池で

以上!

