











フォラケア・スリム エラー・メッセージ 一覧表

| 表示 | 原因 | 対処方法 |
|---|-----------------------------------|--|
|  | 結果が 20mg/dL 未満です。 あるいは操作の誤りです。 | 新しいセンサーで再度測定を行ってください。 それでも同じ結果となる場合は主治医に相談してください。 |
|  | 結果が 600mg/dL を超えています。あるいは操作の誤りです。 | |
|  | 電池の残量が不十分です。 | すぐに電池を取り換えてください。 |
|  | 使用済みのセンサーが挿入されている可能性があります。 | 新しいセンサーで再度測定を行ってください。 |
|  | 結果が表示される前にセンサーがはずれた可能性があります。 | 新しいセンサーで再度測定を行ってください。 |
|  | 本品で検知した温度が許容範囲外です。 | 10～40℃の環境にしばらく置いてから測定してください。 |
|  | | |
|  | メモリー機能のエラーが考えられます。 | 新しいセンサーで再度測定を行ってください。 |
|  | | |
|  | | |