

【iFORA O2 よくあるご質問】

2024年2月

Q. PO200（パルスオキシメータ）との接続方法を教えてください。

A. ホーム画面の「ペアリング」から接続できます。詳細は取扱説明書4ページをご確認ください。

Q. 測定結果の表示を終了したい場合はどうすればよいですか？

A. 測定をやめると測定結果の表示が終了します（PI値の表示が消えます）。PO200の電源がオフになるとアプリとの接続が切れます。

Q. アプリを終了するにはどうすればよいですか？

A. 端末の操作方法に従ってタスクを閉じてアプリを終了してください。

Q. 測定記録を確認できますか？

A. ホーム画面の「測定記録」から確認できます。なお、利用には利用者情報の登録が必要です。詳細は取扱説明書9ページをご確認ください。

Q. 登録確認メールを受信できません。

A. 以下の方法をお試しください。

- ・迷惑メールフォルダを確認する
- ・端末のメール設定画面で「ifora.o2@foracare.com」を受信できるように設定し、「登録確認メールを再送」を行う

Q. ログアウトするにはどうすればよいですか？

A. ホーム画面の「メニュー」を押します。「その他の機能」画面の「ログアウト」からログアウトできます。再度ログインする場合は「利用者情報の登録」画面からログインできます。詳細は取扱説明書11ページをご確認ください。

Q. 利用者情報未登録でもアプリを使えますか？

A. ご使用いただけます。なお、利用者情報の登録は以下の機能を利用する場合に必要です。詳細は取扱説明書9ページをご確認ください。

- ・測定結果の記録機能
- ・測定記録の同期機能

Q. Bluetoothの通信可能距離は何メートルですか？

A. PO200にはBluetooth4.1を搭載しています。通信距離は最大10mとされていますが、ガラスや壁などの障害物により通信が途切れてしまう場合があります。