

# iFORA O2 取扱説明書

2024年4月

アプリは最新のバージョンをお使いください

## はじめに

この取扱説明書には、「iFORA O2」を正しく利用していただくための操作方法と注意点が書かれています。  
本取扱説明書に掲載している画像はiPadのものです。その他のiOS端末やAndroid端末とは異なる場合がございます。

「iFORA O2」（以下、アプリ）は、パルスオキシメータ「フォラケア・PO200」と接続（Bluetoothペアリング）して使用します。



## アプリの機能

### 測定結果の表示

「フォラケア・PO200」（以下、PO200）で測定した結果をアプリの画面で表示します。

### 測定結果の記録

PO200で測定した結果がアプリに記録されます。また、測定記録をCSV形式で取り出し他の端末にメール送信することができます。本機能の利用には「利用者情報の登録」からアカウント登録が必要です。

### 測定記録の同期

測定結果を別端末からも確認できます。本機能の利用には「利用者情報の登録」からアカウント登録が必要です。

## アプリのダウンロード方法

App StoreまたはGoogle Playストアにて、「iFORA O2」と検索、または下のQRコードからアプリをダウンロードできます。



iFORA O2

検索



## アプリ情報

互換性：iOS 14.0以降/Android 8.0以降が必要です。


なお、今後のアップデート等により仕様が変更となる場合があります。

※Android端末で日本版アプリを使用するには、端末設定で「位置情報」へのアクセスを許可する必要があります。

# もくじ

はじめに	P1
ホーム画面	P3
接続設定（Bluetoothペアリング）	P4
測定結果の表示	P6
測定記録	P7
メニュー（その他の機能）	P8
利用者情報の登録	P9
ログアウト／ログイン	P12
パスワード再設定	P13
読み上げ	P15
データ送信	P16
アプリについて／フォラケア・PO200製品情報	P17

# ホーム画面

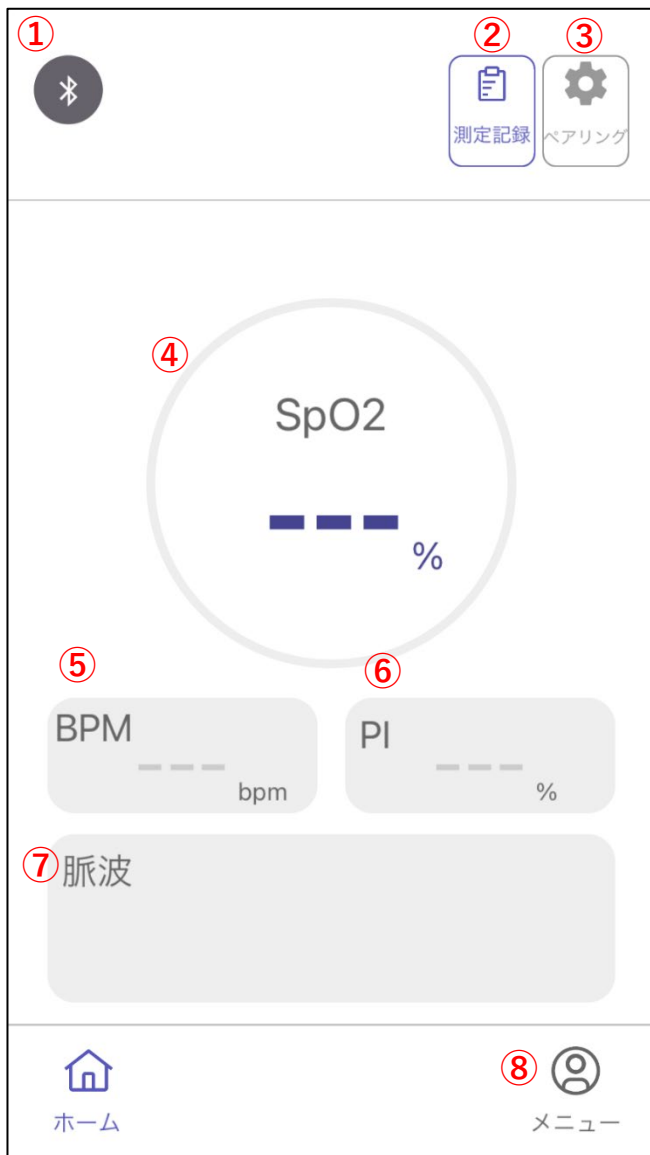

アプリを起動すると、左のホーム画面が開きます。

PO200と接続した状態で測定すると、ホーム画面に測定結果をリアルタイムで表示します。

①Bluetooth  
PO200と接続すると青色になります。

②測定記録  
測定結果を一覧で表示します。

※利用には利用者情報の登録が必要です。  
詳細は9ページをご確認ください。

③ペアリング  
PO200の接続設定を行います。

④SpO2  
測定中のSpO2値を表示します。

⑤BPM  
測定中のBPM（脈拍）を表示します。

⑥PI（灌流指数）  
測定中のPI値を表示します。  
PIは測定部位を循環する血流量を表します。

※PI値が低いとSpO2が正しく測定できないことがあります。


⑦脈波  
測定中の脈波を表示します。

⑧メニュー  
利用者情報の登録や、その他の機能の設定ができます。  
詳細は各ページでご確認ください。



アプリをお使いいただくには、Bluetoothの使用を許可する必要があります。端末設定でBluetoothをオンにしてください。Bluetoothをオンにしない場合、PO200との接続（ペアリング）ができません。

## 接続設定（Bluetoothペアリング）

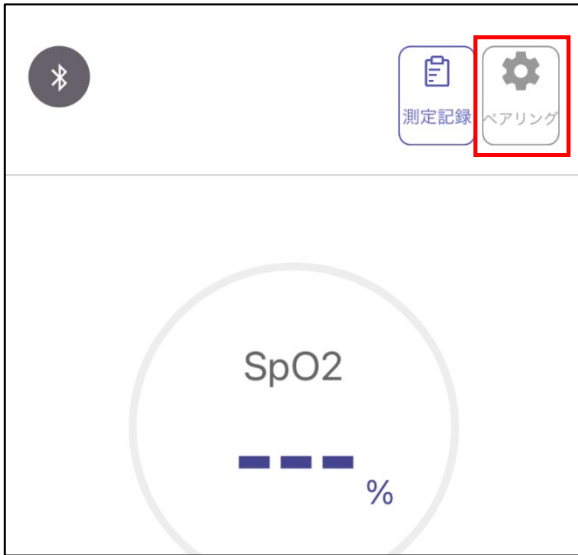

①ホーム画面の「ペアリング」を押します。



②PO200との接続方法が表示されます。接続方法を確認し、画面右上の「次へ」を押します。

※PO200とアプリの接続設定を解除した場合にも表示されます。





③ 「Bluetoothペアリング」画面に切り替わります。

PO200の画像右横の「検索」を押し、PO200の電源をオンにします。

接続方法：

PO200との接続方法（4ページ）が表示されます。



④接続可能な機器が表示されます。


「追加」を押して機器を登録します。

「見つかった機器」が表示されない場合、以下の方法をお試しください。


- ・アプリを再起動する
- ・アプリを一度終了し、端末の設定で再度Bluetoothをオンにする



⑤画面左上の「戻る」を押すと、「保存して終了」が表示されます。「はい」を押して、PO200との接続設定を保存してください。

 を押すとPO200の接続設定が解除されます。

## 測定結果の表示

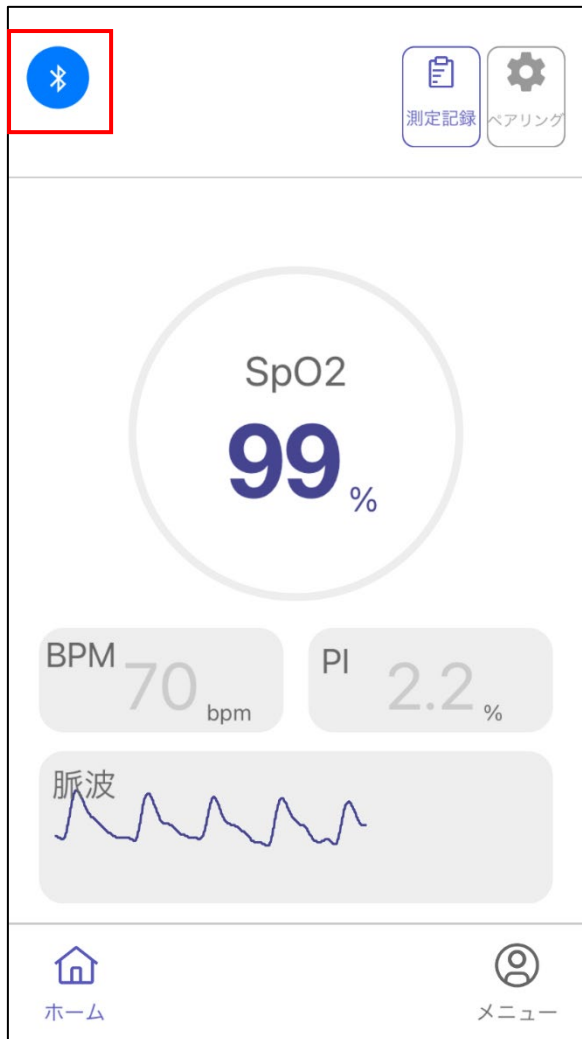

PO200で測定を開始し、ディスプレイに測定結果が表示されると、アプリ画面にも測定結果が表示されます。


PO200と接続すると、Bluetoothマークは青色になります。




測定をやめると測定結果の表示が終了します（PI値の表示が消えます）。

PO200の電源がオフになるとアプリとの接続が切れます。

PO200との接続が切れるとBluetoothマークは灰色になります。

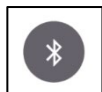

# 測定記録

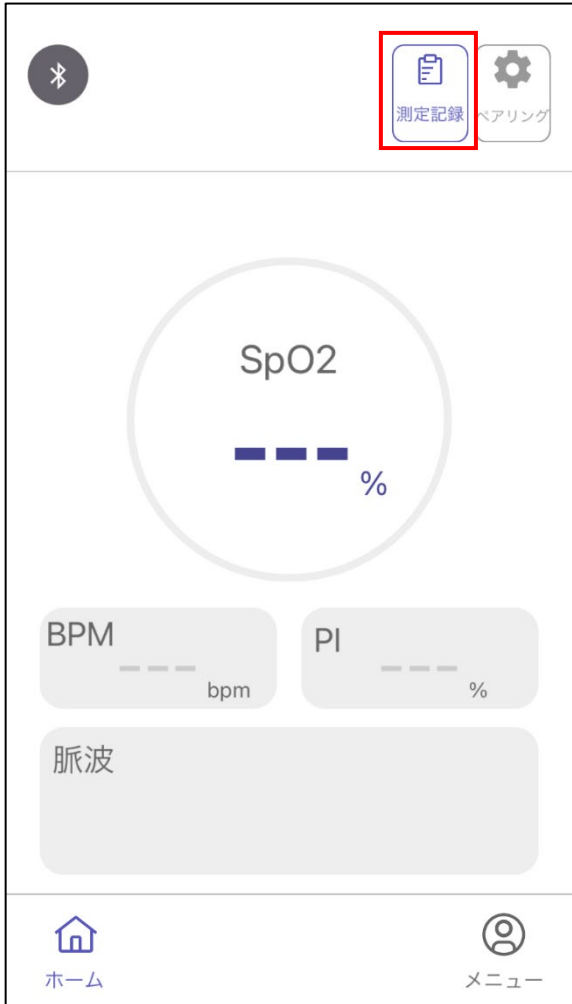

- ① ホーム画面の「測定記録」を押すと、測定結果が一覧で確認できる画面が開きます。


※利用には利用者情報の登録が必要です。  
詳細は9ページをご確認ください。

測定日時	SpO2 / BPM	PI
2024/01/29 16:19	99 / 73	PI: 8.8
2024/01/29 16:18	98 / 78	PI: 8.8
2024/01/29 14:56	98 / 86	PI: 9.0
2024/01/29 14:52	99 / 83	PI: 10.0
2024/01/29 9:40	98 / 81	PI: 11.1
2024/01/25 17:15	99 / 73	PI: 8.0
2024/01/25 14:21	99 / 85	PI: 6.1
2024/01/24 17:42	100 / 69	PI: 3.3
2024/01/24 17:29	99 / 71	PI: 3.3

- ② 測定日時とSpO2/BPM/PIが表示されます。SpO2/BPM/PIは、1回の測定中に最も安定したときの数値が記録されます。

PO200の電源をオフにする、またはアプリとの接続が切れるごとに1回分の測定記録が保存されます。

## メニュー（その他の機能）

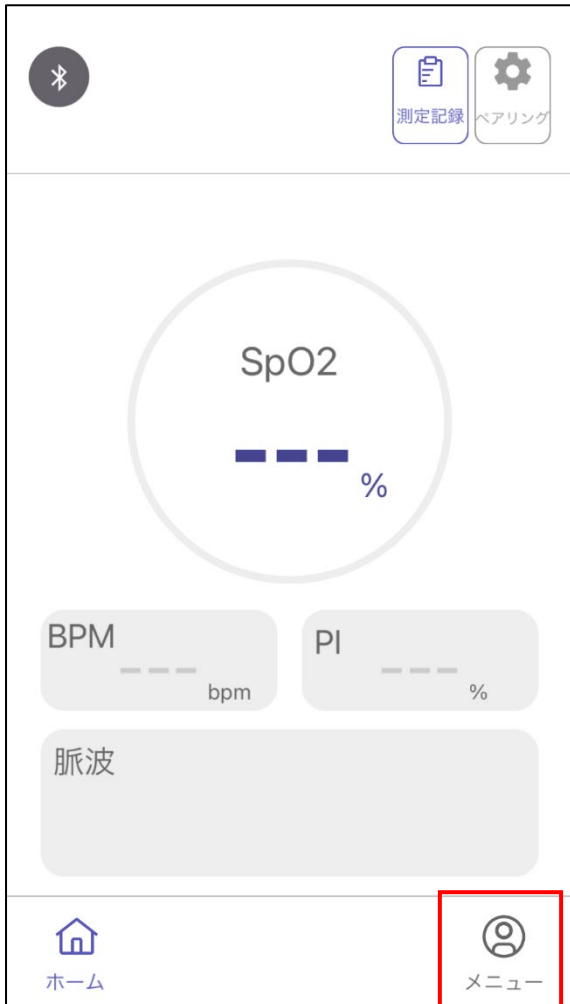

ホーム画面の「メニュー」を押すと、「その他の機能」画面が開きます。



※「共有」（旧：Care Group）は医療機関向けの機能です。  
詳細は弊社webサイトの「iFORA O2 Care Management」の使用方法をご確認ください。



## 利用者情報の登録



「利用者情報の登録」を押すと左の画面が開きます。

「利用者情報の登録」は以下の機能を利用する場合に必要です。

- ・測定結果の記録機能
- ・測定記録の同期機能

スキップ

スキップ：  
押すとホーム画面に戻ります。

# 利用者情報の登録

新規登録

① メールアドレス  
パスワード  
名前  
誕生日 性別

②  同意する プライバシーポリシー

③ 新規登録 スキップ

すでにアカウントをお持ちですか?

利用者情報の登録には、メールアドレスを使用します。  
端末のメール設定で「ifora.o2@foracare.com」を受信できるように設定してください。

- ①以下の項目を入力します。  
未入力の項目がある場合、新規登録できません。
  - ・メールアドレス
  - ・パスワード（半角6文字以上）
  - ・名前
  - ・誕生日
  - ・性別
- ②プライバシーポリシーをご確認いただき「同意する」にチェックを入れます。  
チェックが入っていない場合、新規登録できません。
- ③「新規登録」を押します。

すでにアカウント登録済みの場合は、ここからログイン画面に移動してください。

iFORA O2  
宛先: ifora.o2@example.com

登録確認\_iFORA O2

名前様,

iFORA O2をご利用いただきありがとうございます。  
本登録を押して登録を完了させてください。

- ④入力したメールアドレス宛に、「登録確認\_iFORA O2」メールが届きます。「本登録」を押します。

メールが届かない場合、迷惑メールフォルダを確認してください。

www.foracare.live の内容  
Account Authenticated

OK

- ⑤ブラウザが開き左のメッセージが表示されたら本登録完了です。「OK」を押して閉じます。



利用者情報の登録後（ログイン中）は、「その他の機能」画面は白色の背景で表示されます。



ログアウトした場合、「その他の機能」画面は紫色背景の表示に戻ります。

## ログアウト




「ログアウト」画面からログアウトできます。画面下にある「ログアウト」を押します。

お問い合わせ：

メールアドレスを押すとメール画面が開きます。

※iOS端末の場合、端末既存のメールアプリのみでご利用いただけます。メール画面が開かない場合、端末のメールアプリでメールアドレスの設定を行ってください。

## ログイン

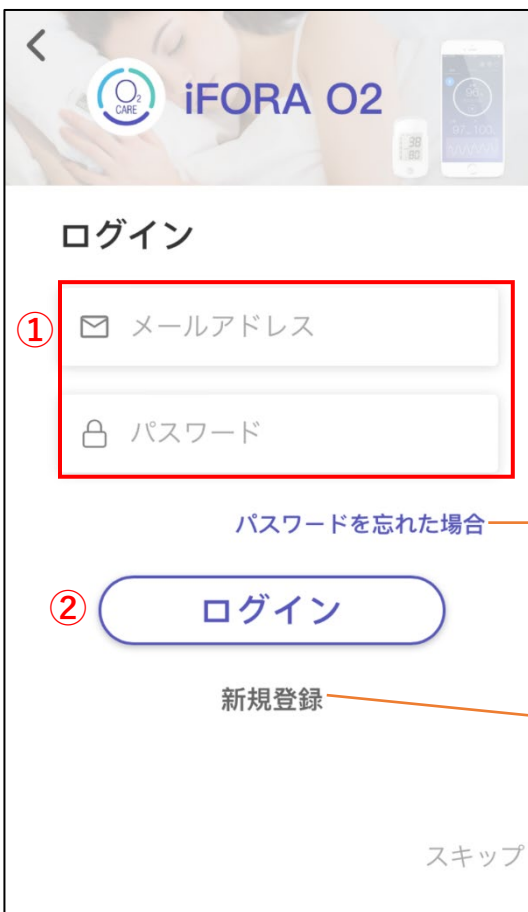

「利用者情報の登録」の「ログイン」画面からログインできます。

- ①メールアドレスとパスワードを入力します。
- ②「ログイン」を押します。

パスワードを忘れた場合：

パスワードの再設定ができます。詳細は13ページをご確認ください。

新規登録：

新規登録画面（10ページ）が開きます。

# パスワード再設定




「利用者情報登録」の「ログイン」画面からパスワードの再設定ができます。

① 「パスワードを忘れた場合」を押します。




② 登録済みのメールアドレスを入力します。

③ 「送信」を押します。

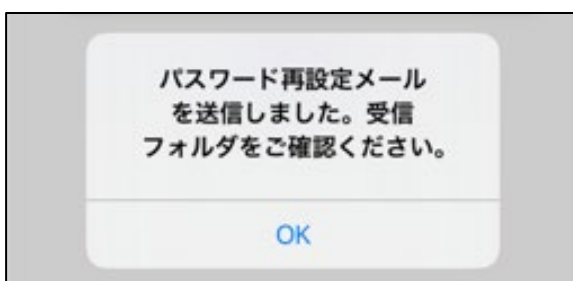

④ 左のメッセージが表示されます。「OK」を押して閉じ、メールを確認してください。

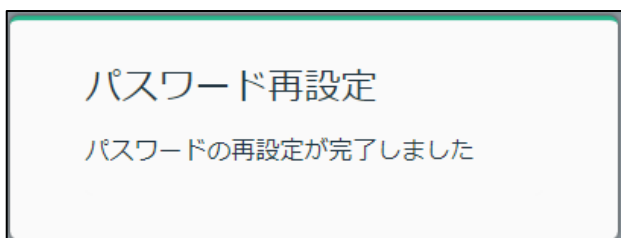

⑤ 「パスワード再設定\_iFORA O2」メールが届きます。

「認証コード」を控えてください。

「[パスワード再設定](#)」を押すと、パスワードの再設定画面（ブラウザ）が開きます。

⑥ 認証コードを入力します。


⑦ 「パスワード」に、新しく設定するパスワードを入力します。

⑧ 「パスワード確認」に再度、新しく設定するパスワードを入力します。

⑨ 「送信」を押します。

⑩ 左のメッセージが表示されたら、パスワードの再設定が完了です。

# 読み上げ

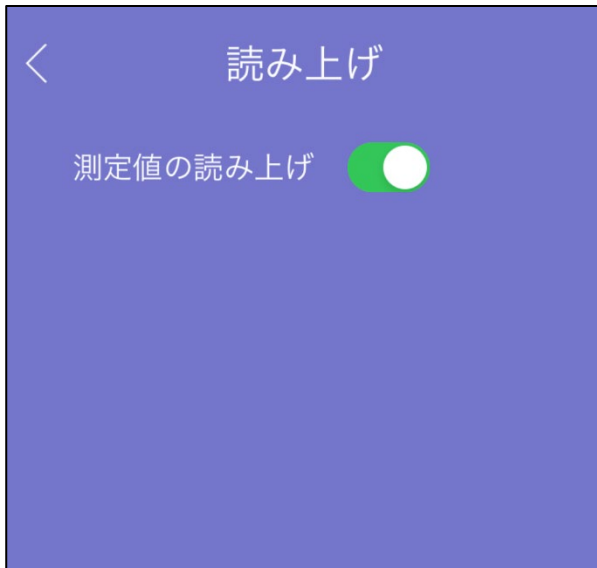


測定中に約8秒間隔でSpO2値を読み上げます。この機能を使用する場合、端末の音量設定を行ってください。

## 【利用者情報が未登録の場合】

画面は紫色の背景で表示されます。

「測定値の読み上げ」をオンにします。

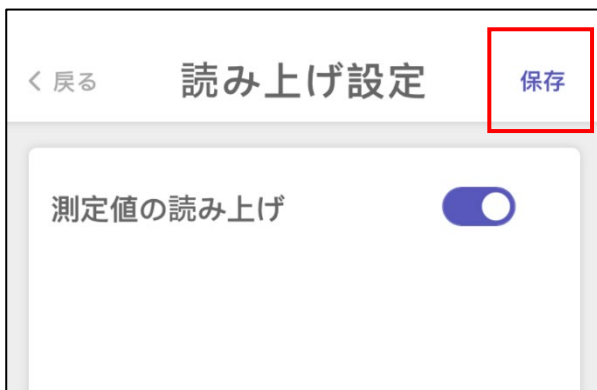

## 【利用者情報を登録済の場合】

画面は白色の背景で表示されます。

- ①「測定値の読み上げ」をオンにします。
- ②画面右上の「保存」を押すと設定が保存されます。




- ③メッセージが表示されます。「OK」を押して閉じます。

## データ送信



測定記録をCSV形式で取り出し他の端末にメール送信することができます。

### 【利用者情報が未登録の場合】

- ①取り出す記録の期間を、1週間/1カ月/すべてから選択します。
- ②  を押してメール画面を開きます。
- ③宛先を入力して送信します。

※iOS端末の場合、端末既存のメールアプリのみでご利用いただけます。メール画面が開かない場合、端末のメールアプリでメールアドレスの設定を行ってください。

### 自動アップロード

以下の機能を利用する場合に使用します。  
※利用には利用者情報の登録が必要です。

- ・測定結果の記録機能
- ・測定記録の同期機能



### 【利用者情報を登録済の場合】

「利用者情報の登録」で設定したメールアドレスへ送信されます。

- ①取り出す記録の期間を、1週間/1カ月/すべてから選択します。
- ②「送信」を押します。
- ③メッセージが表示されます。「OK」を押して閉じ、メールを確認してください。



# アプリについて



## 取扱説明書

「iFORA O2 取扱説明書」（本取扱説明書）をブラウザで表示します。

## よくあるご質問

「iFORA O2 よくあるご質問」をブラウザで表示します。

# フォラケア・PO200製品情報

寸法	63 (縦) × 37 (横) × 32 (厚さ) mm	重さ	40g (電池を含まない)
電源	1.5V単4アルカリ乾電池×2本	測定範囲(SpO2)	0～100%
測定範囲(脈拍数)	30～250bpm	測定精度(SpO2)	100～80%：±2% 79～70%：±3% 69%以下：規定なし
測定精度(脈拍数)	±1bpmまたは±1% (大きい方)		
電撃に対する保護の形式及び程度	内部電源機器 BF形	水の有害な浸入に対する保護の程度に関する分類	IP22

弊社webサイトの「フォラケア・PO200」製品情報ページを表示します。