


パルスオキシメータ「フォラケア・PO200」とiFORA O2をBluetooth接続して測定した記録を閲覧することができます。
この手順書では、クラウドでのグループ作成手順と操作方法、患者さまの測定記録共有の設定を説明しています。

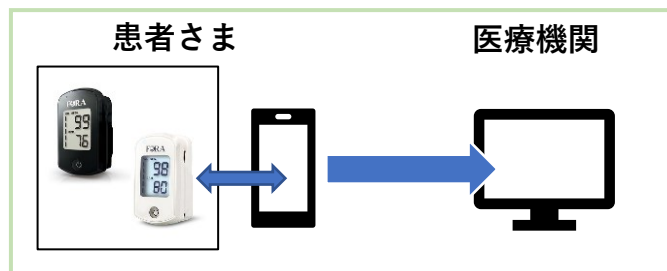

①アカウント作成


(1)下のURLまたはQRコードから申請フォームにアクセスし、必要情報を入力して送信してください。

<https://forms.gle/kHSFk4cf9RvnFJTX7>




(2)アカウント登録が完了すると、登録したメールアドレスに「iFORA O2 Group Email Certification」メールと、「アカウント情報 iFORA O2 Care Management」メールが届きます。

「iFORA O2 Group Email Certification」メールの「[Validate Email](#)」を押してください。

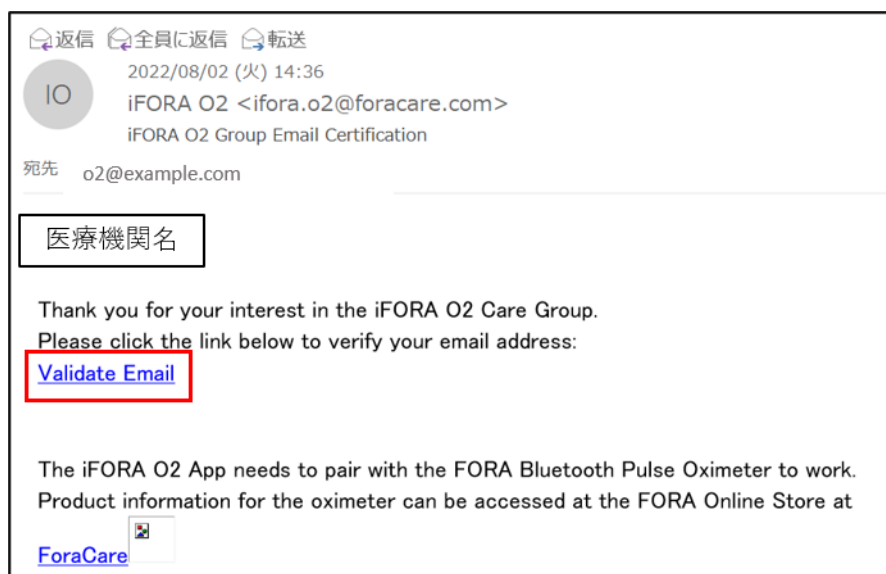

(3)以下のメッセージが表示されたら登録完了です。

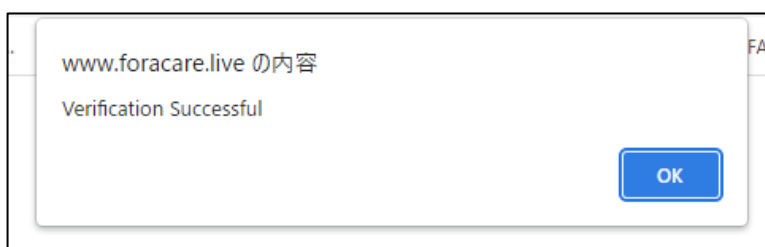

② 「iFORA O2 Care Management」 ログイン画面



<https://www.foracare.live/ForaWeb/login?redirect=%2Flogin>




上のURLまたはQRコードからクラウドへのログイン画面を開くことができます。ご使用開始後は、お気に入り登録などでログインページの保存を推奨します。

登録したメールアドレスとパスワードを入力してログインしてください。

※左のメールアドレス、パスワードは一例です


ログインした画面です。
右上のを押すとログアウトできます。
の左には医療機関名が表示されます。

※表示がおかしい場合はブラウザの言語設定を「英語」にしてご利用ください。

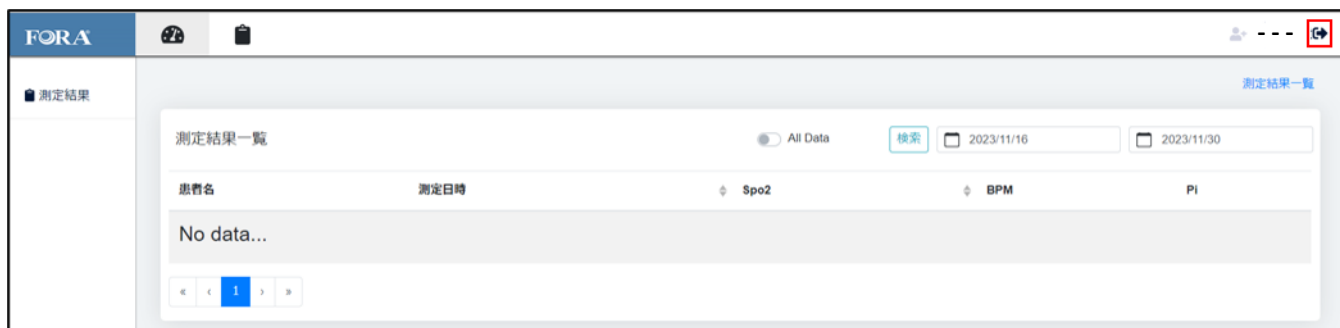

③ アカウント登録情報について

医療機関名、医療機関コードは患者さまの測定記録共有の設定に必要です。
患者さまへお伝えください。

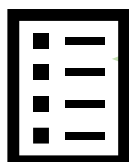


医療機関名：○○××
医療機関コード：△△□□

※イメージ

④測定記録の閲覧設定


(1)患者さまから測定記録共有の申請がくると、 アイコンに申請件数が赤く表示されます。アイコンを押してください。

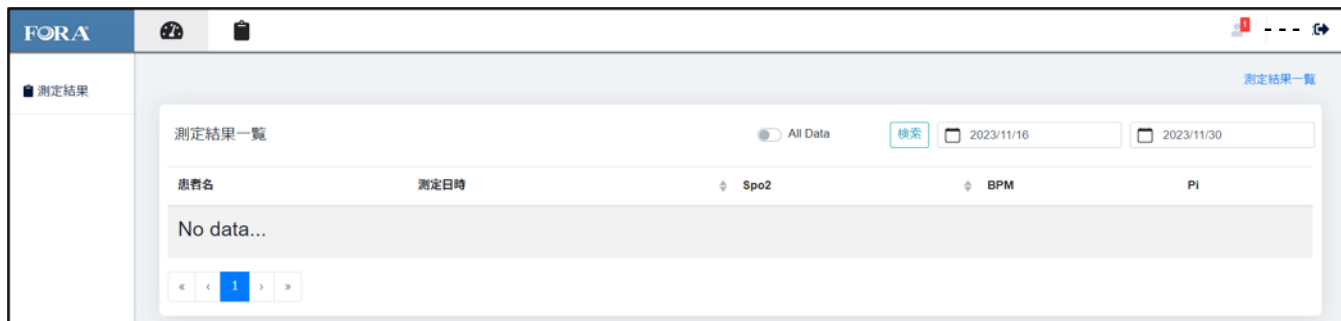


(2)患者さま名を確認し、「承認」を押してください。



(3)「保存」を押してください。患者さま名は変更することができます。

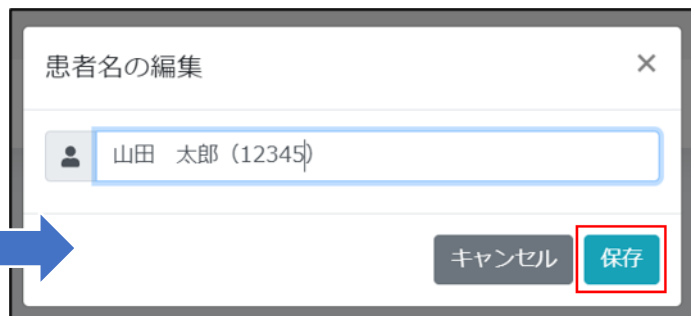

(4)患者さまを登録すると、 ページに表示されます。

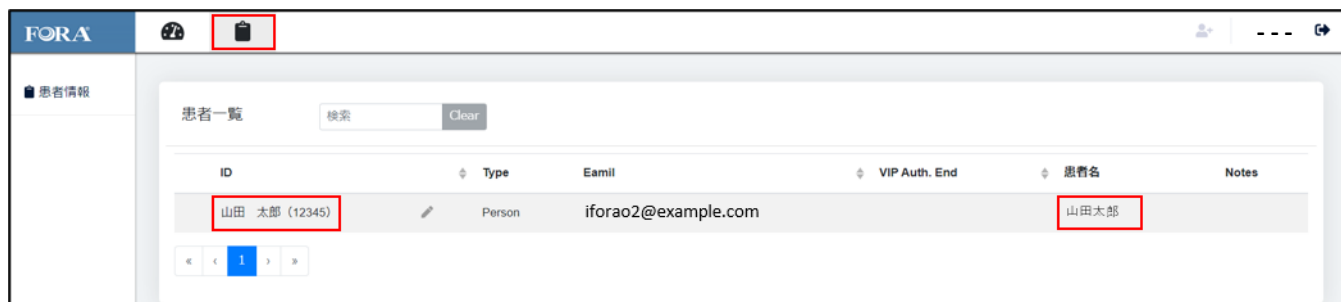

※(3)で名前を変更した場合、「ID」には変更した名前が表示されます。「患者名」には申請時の名前が表示されます。

「iFORA O2 Care Management」アイコン説明



測定結果一覧

登録しているすべての患者さまの測定記録が表示されます。

患者名	測定日時	Spo2	BPM	PI
山田太郎	2023-11-30 11:22:23	98	77	2.9
佐藤花子	2023-11-30 11:19:36	100	81	1.3
鈴木二郎	2023-11-22 16:25:28	98	77	13.8
鈴木二郎	2023-11-22 16:21:54	98	90	13.1



患者一覧

登録している患者さまのアカウントが表示されます。
※画面の患者名やメールアドレスは一例です

ID	Type	Email	VIP Auth. End	患者名	Notes
鈴木 二郎 (22541)	Person	suzuki@example.com		鈴木二郎	
山田 太郎 (12345)	Person	iforao2@example.com		山田太郎	
田中 太郎 (78452)	Person	tanaka@example.com		田中太郎	
佐藤 花子 (65418)	Person	hanako@example.com		佐藤花子	
新井 三郎 (53497)	Person	arasabu@example.com		新井三郎	

測定結果一覧と患者一覧で表示されている測定記録を押すと、患者さまごとのすべての測定記録を確認できます。

測定日時	Spo2	BPM	PI
2023-11-30 11:19:36	100	81	1.3
2023-09-20 15:46:16	98	82	6.7
2023-09-20 15:44:25	98	73	6.7

All Data：PO200本体に保存された記録（PIなし）を含めて表示します。

検索：表示したい測定記録の期間を選択して「検索」を押すと、選択した期間のみの測定記録が表示されます。