


パルスオキシメータ「フォラケア・PO200」とiFORA O2を接続した状態で測定した記録を医療機関等へ共有することができます。
この手順書では共有の設定を説明しています。

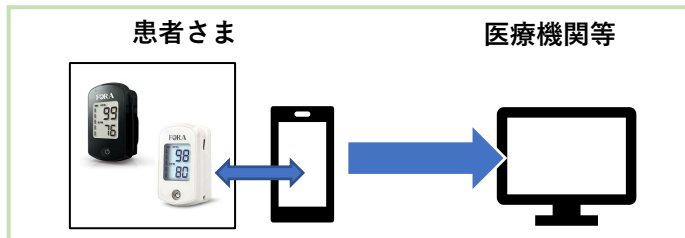

アプリ「iFORA O2」（アイフォラ オーツー）のダウンロード（無料）

App Store/Google Playストアで「iFORA O2」と検索、または右のQRコードからアプリをダウンロードできます。



iFORA O2 検索





App Store



Google play ストア

①利用者情報の登録

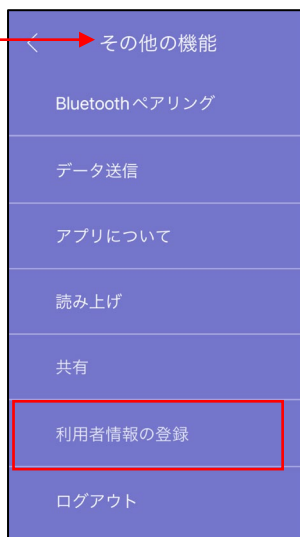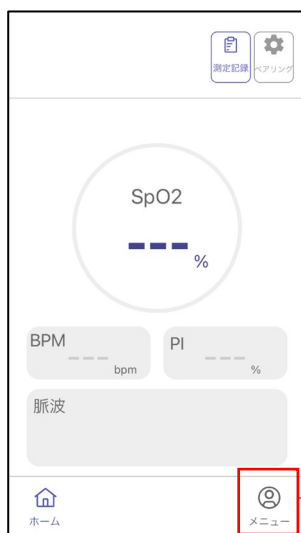

- (1) アプリを起動します。
ホーム画面の「メニュー」を押して「その他の機能」画面を開きます。
- (2) 「利用者情報の登録」を押します。




- (3) 以下の項目を入力します。未入力の項目がある場合、新規登録できません。
 - ・メールアドレス
 - ・パスワード（半角6文字以上）
 - ・名前
 - ・年齢
 - ・性別

- (4) プライバシーポリシーをご確認いただき「同意する」にチェックを入れます。チェックが入っていない場合、新規登録できません。

- (5) 「新規登録する」を押します。

- (4) 入力したメールアドレス宛に「登録確認_iFORA O2」メールが届きます。「本登録」を押します。

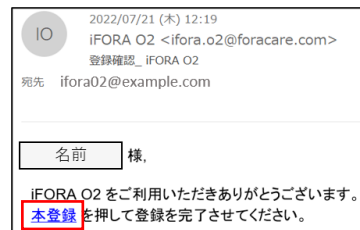

- (5) ブラウザが開き下のメッセージが表示されたら登録完了です。「OK」を押して閉じます。



②共有設定（旧：Care Group）




(1) ホーム画面の「メニュー」を押して「その他の機能」画面を開きます。

※利用者情報の登録後（ログイン中）は、「その他の機能」画面は白色の背景で表示されます。

(2) 「共有」を押します。



(3) 「医療機関コードを入力」に医療機関等に指定された医療機関コードを入力し、下の「申請する」を押します。

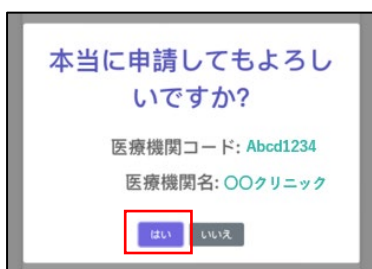

(4) 左のメッセージが表示されます。

測定記録を共有したい医療機関等の名称が正しいことを確認して「はい」を押します。

間違っている場合は「いいえ」を押してメッセージを閉じ、医療機関コードを入力し直してください。



(5) 医療機関側の処理待ちの状態では「申請中」と表示されます。共有されると表示が「共有済」に切り替わります。

「申請中」の状態では  を押すと申請の取り消しができます。

「共有済」の状態では  を押すと医療機関との共有設定が解除されます。